

Pořadí zkumavek při odběru

Správné pořadí odběrových zkumavek při odběru krve má vliv na stabilitu vzorků pro jednotlivá laboratorní vyšetření. Dodržení správného postupu při odběru včetně dodržení správného pořadí zkumavek je důležité zejména pro koagulačních vyšetření.

Doporučené pořadí zkumavek při odběru krve je takové, aby **zkumavka pro koagulační vyšetření s citrátem sodným (světle modrý uzávěr) byla vždy při odběru více zkumavek zařazena jako druhá.**

A. Více zkumavek včetně zkumavky pro sedimentaci

Barva víčka	Typ zkumavky	Popis zkumavky
	zkumavka s citrátem sodným pro FW	zkumavka s antikoagulačním činidlem - citrát sodný (4+1), pro stanovení sedimentace, černý uzávěr
	zkumavka s citrátem sodným	zkumavka s antikoagulačním činidlem - citrát sodný (9+1), světle modrý uzávěr
	sérová zkumavka bez resp. se separačním gelem; s aktivátorem srážení	zkumavka bez antikoagulačního činidla, červený resp. oranžový uzávěr
	zkumavka s heparinátem lithným	zkumavka s antikoagulačním činidlem - heparinátem lithným, zelený uzávěr
	zkumavka s EDTA	zkumavka s antikoagulačním činidlem - K ₃ EDTA, fialový uzávěr
	zkumavka s fluoridem/oxalátem	zkumavka s aditivou fluorid sodný / oxalát draselný, šedý uzávěr

B. Více zkumavek bez zkumavky pro sedimentaci

Barva víčka	Typ zkumavky	Popis zkumavky
	sérová zkumavka bez resp. se separačním gelem; s aktivátorem srážení	zkumavka bez antikoagulačního činidla, červený resp. oranžový uzávěr
	zkumavka s citrátem sodným	zkumavka s antikoagulačním činidlem - citrát sodný (9+1), světle modrý uzávěr
	zkumavka s heparinátem lithným	zkumavka s antikoagulačním činidlem - heparinátem lithným, zelený uzávěr
	zkumavka s EDTA	zkumavka s antikoagulačním činidlem - K ₃ EDTA, fialový uzávěr
	zkumavka s fluoridem/oxalátem	zkumavka s aditivou fluorid sodný / oxalát draselný, šedý uzávěr

C. První zkumavka lze jen pro PT a PT_INR (Quick)

Barva víčka	Typ zkumavky	Popis zkumavky
	zkumavka s citrátem sodným	zkumavka s antikoagulačním činidlem - citrát sodný (9+1), světle modrý uzávěr